

## AKUTOL™ sprej, 35 ml, 60 ml

### AKUTOL™ SPREJ

Zdravotnický prostředek, ochranný plastický obvaz ve spreji s hnacím plynem.

### VŠEOBECNÝ POPIS

AKUTOL™ sprej je ochranný plastický obvaz ve spreji s hnacím plynem, používá se k rychlému ošetření oděrek a drobných povrchových poranění, zejména v namáhaných místech, která se těžko kryjí klasickými obvazovými prostředky (lokty, kolena). Nanáší se postříkem na vyčištěnou, desinfikovanou, oschlou ránu. Do 3 minut zaschne a vytvoří neviditelnou voděodolnou vrstvu filmového obvazu. Brání kontaktu rány se zevním prostředím, nebrání přirozenému dýchání. Tvoří vlhké mikroprostředí, které urychlí proces hojení. Umožní sledovat hojení a odstraní se samovolně otěrem po 3–4 dnech.

### URČENÝ ÚČEL POUŽITÍ

Ochranný plastický obvaz ve spreji s hnacím plynem k rychlému ošetření oděrek a drobných povrchových poranění.

### INDIKACE

AKUTOL™ sprej je určený k ošetření oděrek a drobných povrchových poranění (Abrasis, Excoriationes).

### KONTRAINDIKACE

Nepoužívat na hluboké, nečisté, zanícené rány a na masivní krvácení (Haemorrhagia). Nepoužívat v případě alergické reakce na některou z obsažených složek přípravku. Doporučuje se nástřík jedné vrstvy plastického obvazu, nástřík více než 3 vrstev zhorší přirozené dýchání rány a zpomalí proces hojení. Po nanesení spreje je možný krátkodobý pocit štípání. Nepoužívat pro děti do 2 let.

### ZAMÝŠLENÝ UŽIVATEL

Pro celou populaci, pro diabetiky. Může se použít v těhotenství, i v době kojení, ne však na velké plochy. Přípravek je možné použít i u dětí od 2 let.

### ZAMÝŠLENÉ MÍSTO APLIKACE

Oděrky a drobná povrchová poranění.

### DOBA TRVÁNÍ

Do zhojení rány (obvykle několik dní).

### DOBA POUŽITELNOSTI

3 roky – do data uvedeného na dně nádoby.

### ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST PRO URČENÝ ÚČEL POUŽITÍ

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Odstraňte obsah/obal předáním do sběrného dvora jako nebezpečný odpad.

Při práci nejezte, nepijte, nekuřte. Nepoužívejte v blízkosti ohně. Chraňte oči před zásahem spreje. Sprej nevdechujte. Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda související s tímto výrobkem by měla být hlášena výrobcem a Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.

### POSTUP PRVNÍ POMOCI A POUŽITÍ AKUTOL™ SPREJ

1. Ránu vymyjte tekoucí vodou směrem od středu rány ven.
2. Z rány odstraňte mechanické nečistoty (písek, štěrky).
3. Ránu desinfikujte vhodným prostředkem a nechte oschnout.
4. Sprej protřepejte, aplikujte dnem dolů ze vzdálenosti 15 - 20 cm od povrchu poranění.
5. Naneste na celou plochu rány tak, aby příliš nestékal, nechte 3 minuty zaschnout.
6. V případě zeslabení vrstvy obvazu je možné nástřík AKUTOL™ sprejem opakovat.

### SLOŽENÍ

Ethanolum denaturatum, Dimethyletherum, Copolymerum acrylatum, Dioxacyclopentanum.

### DATUM REVIZE TEXTU


11. 6. 2019



AVEFLOR, a. s., Budčeves 26, 507 32 Kopidlno, Česká republika  
IČ.: 64259838, www.akutol.cz



Nebezpečí

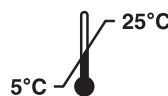

EAN 8594013701952