



TRIODERM®

Trioderm® CARE Chladicí sprej 200 ml

Trioderm® CARE Chladicí sprej

Zdravotnický prostředek pro rychlou úlevu od bolesti. Vhodný i pro děti.

Všeobecný popis

Trioderm® CARE Chladicí sprej je chladicí sprej pro rychlou úlevu od bolesti spojené s pohmožděním svalů, podvrtnutím kloubů, svalovými křečemi a jinými zraněními v důsledku nárazu, pádu nebo podvrtnutí a pro zmírnění bolesti při drobných zákrocích, jako je např. venepunkce před zavedením kanyly nebo katetru do žíly. Obsahuje nízkovroucí látky působící na postiženém místě jako lokální anestetikum. Vytváří okamžitý chladivý účinek v místě ošetření, zmírní na 3 minuty pocit bolesti a uvolní postižené místo.

Vhodné pro celou populaci, děti od 3 let, pro diabetiky.

Určený účel

Přechodné zmírnění bolesti při pohmoždění svalů, podvrtnutí kloubů, svalových křečích a jiných zraněních v důsledku nárazu, pádu nebo zvýšené sportovní zátěže a zmírnění bolesti při drobných zákrocích, jako je např. venepunkce před zavedením kanyly nebo katetru do žíly.

Indikace

Bolesti spojené s pohmožděním svalů (Musculus contusus), podvrtnutím kloubů (lunctoram distorsio), se svalovými křečemi (Musculus distentio) a jinými menšími sportovními zraněními v důsledku nárazu, pádu nebo zvýšené zátěže (Athletae effectus auctus) a bolesti provázející drobné zákroky, jako je např. venepunkce před zavedením kanyly nebo katetru do žíly.

Kontraindikace

Nestříkat delší dobu, ani z kratší vzdálenosti, aby nedošlo tvorbě omrzlin. Nepoužívat na obličej, krk, citlivé oblasti těla nebo otevřené rány. Nepoužívat v případě alergické reakce na některou z obsažených složek. Nepoužívat u dětí do 3 let. Použití u těhotných žen a v době kojení konzultovat s lékařem.

Zamyšlený uživatel

Pro celou populaci, pro děti od 3 let věku a pro diabetiky.

Zamýšlené místo aplikace

Neporušená kůže na postižených místech těla.

Doba trvání

Přechodný účinek do 3 minut.

Návod k použití

Sprej se nanáší stisknutím rozprašovače na kůži nad postiženým místem ze vzdálenosti 15 cm od povrchu těla, aplikuje se 2-3x opakovaným nástřikem po dobu 5 vteřin.

Zvláštní požadavky na bezpečnost pro určený účel

U přecitlivělých osob může způsobit alergickou kožní reakci. V případě silného zčervenání ošetřeného místa, vzniku omrzliny nebo puchýře po nadměrném použití spreje a při pochybnostech vždy vyhledat lékaře. Chraňte oči před zásahem spreje. Sprej nevdechujte. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda související s tímto výrobkem by měla být hlášena výrobci a Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Obal likvidujte v rámci organizovaného sběru.

Doba použitelnosti

30 měsíců. Spotřebujte nejdéle do data uvedeného na dně obalu.

Složení

Butane, propane, isobutane


Datum revize textu: duben 2021



AVEFLOR, a.s., Budčevs 26, 507 32 Kopidlno,
Česká republika, www.akutoL.cz



3

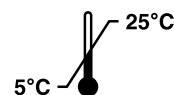

Nebezpečí