



TRIODERM®

## Trioderm® CARE Ušní sprej, 50 ml

### Trioderm® CARE Ušní sprej

Zdravotnický prostředek na bázi vody s obsahem rostlinných látek pro ušní hygienu – pro celou populaci, pro děti od 3 let a pro diabetiky.

### Všeobecný popis

Trioderm® CARE Ušní sprej pomáhá ušnímu mazu navrátit a uchovat si ochrannou a hydratační funkci. Pomáhá čištění ucha, zlepšuje zdraví ucha a preventivně snižuje možnost vzniku zánětu. Jemný proud spreje má mechanickou funkci, stlačený vzduch rovnoměrně rozptýlí mikroskopické kapičky aerosolu v zevním zvukovodu. Roztok spreje vyplachuje prach, nečistoty a přítomné mikroorganismy. Změkčuje ušní maz, dodává vlhkost a pružnost kůži zevního zvukovodu a tím preventivně napomáhá proti zánětu. Sprej pomáhá ušnímu mazu navrátit a uchovat si ochrannou, hydratační a čisticí funkci, při pravidelném používání předchází vzniku ušní zátky. V případě zánětu ucha je možné použít Trioderm® CARE Ušní sprej jako podpůrný prostředek medikované léčby. V zevním zvukovodu tvoří vlhké mikroprostředí, které je vhodné pro urychlení regenerace postiženého místa.

### Indikace

Nadměrné množství ušního mazu v zevním zvukovodu, ušní hygiena, prevence vzniku ušní zátky, preventivní snížení možnosti vzniku zánětů a bolesti ucha, podpůrný prostředek při medikované léčbě zánětu ucha.

### Kontraindikace

Nepoužívejte v případě alergické reakce na kteroukoli z obsažených složek přípravku. Jestliže jste se podrobili paracentéze (propíchnutí ušního bubínku), používejte sprej pouze pod lékařským dohledem nebo jen na doporučení lékaře! V následujících případech konzultujte s ORL specialistou: celkové ucpání zevního zvukovodu ušním mazem, infekce a bolesti ucha nebo zevního zvukovodu, poruchy rovnováhy, imunosuprese, operace ucha nebo zevního zvukovodu, protržení bubínku, cizí předmět ve vnějším zvukovodu, těhotenství a kojení. Chraňte oči před zásahem spreje. Sprej nevdechujte.

### Určený účel

Změkčení ušního mazu, dodání vlhkosti a pružnosti kůži zevního zvukovodu, vytvoření vlhkého mikroprostředí, které pomáhá urychlit regeneraci ošetřeného místa.

### Zamýšlený uživatel

Pro celou populaci, pro děti od 3 let věku a pro diabetiky.

### Zamýšlené místo aplikace

Zevní zvukovod

### Návod k použití

1. Před aplikací spreje lehce nakloňte hlavu: při aplikaci do levého ucha vpravo, při aplikaci do pravého ucha vlevo. Při aplikaci není nutno držet sprej ve vzpřímené poloze.
2. Opatrně zaveďte aplikátor do vnější části ucha. Koncovka dávkovače je speciálně tvarovaná, aby bránila zavedení aplikátoru hluboko do ucha a poškození ušního bubínku.
3. Stlačte aplikátor na dobu 1 vteřiny, ale nestříkejte přímo proti ušnímu bubínku! Zůstaňte v nakloněné pozici nejméně po dobu 30 vteřin, aby tekutina samovolně vtekla do vnitřní části zvukovodu.
4. Po uplynutí doby působení nakloňte hlavu na druhou stranu a nechte roztok vytéct zpět.
5. Opatrně osušte vnější části ucha čistým ručníkem nebo papírovým kapesníkem.
6. Celý proces opakujte s druhým uchem.
7. Po každém použití omyjte aplikátor horkou vodou a mýdlem. Z hygienických důvodů se doporučuje použít sprej pro jednoho člověka.
8. Dávkování: 1–3× týdně, v případě potřeby každý den.

### Zvláštní požadavky na bezpečnost pro určený účel

Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda související s tímto výrobkem by měla být hlášena výrobci a Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Obal likvidujte v rámci organizovaného sběru. U precitlivělých osob může způsobit alergickou kožní reakci.

### Zvláštní požadavky na bezpečnost

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Uchovávejte mimo dosah dětí.

### Doba použitelnosti

Spotřebujte nejdéle do data uvedeného na dně obalu.

### Složení

Aqua, Propylene Glycol, Polysorbate 80, Aloe Ferox Leaf Extract, Malva Sylvestris Extract, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Tocopheryl Acetate, Parfum

### Datum revize textu: leden 2020



AVEFLOR, a.s., Budčevs 26, 507 32 Kopidlno,  
Česká republika, www.akutol.cz




TRIODERM®

## Trioderm® CARE Ušní sprej, 50 ml

---



3

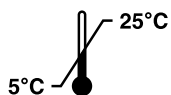

Nebezpečí