

Digitální detektor alkoholu AL 2500 - Black

Návod k obsluze



1. vstup dechu (inhalátor)
2. displej – zobrazované údaje jsou v promile
3. tlačítko – zapnutí

Detekce alkoholu

1. Stiskněte krátce (1 sec.) tlačítko ZAP (3). Detektor začne na displeji odpočítávat čísla až se na displeji zobrazí 0. Během této doby se zahřívá senzor v detektoru a celý přístroj se připravuje k činnosti. Čas přípravy k měření se liší podle prostředí ve kterém se nacházíte.
2. Jakmile uslyšíte pípnutí (2x), tak bezprostředně po tomto signálu foukejte rovnoměrně do detektoru ze vzdálenosti cca 2 cm (4 sec.). Po dobu foukání budete slyšet zvukové znamení. Po pípnutí (2x) přestaňte foukat do detektoru. Výsledek testu je zobrazen na displeji. Pokud jste foukali krátkou dobu na displeji se zobrazí „E“. Detektor vypnete a měření opakujte.
3. Údaje na displeji jsou udávány v promile. V případě, že jste požili velmi malé množství alkoholu (koncentrace je pod 0,1promile), detektor naměří hodnotu 0,0.

Výměna baterií

Pokud ve spodní části displeje začne blikat symbol baterie je nutné baterie vyměnit.

Pozor: po zapnutí detektoru jsou na displeji zobrazeny všechny symboly jako test.

Neznamená to že je nutné měnit baterie

Používejte pouze alkalické baterie (Duracell)

Důležitá upozornění

1. Počkejte nejméně 30 minut po konzumaci alkoholu před používáním detektoru alkoholu. Budete mít jistotu, že vzorek alkoholu je odebrán pouze z vašich plic a ne ze zbytků alkoholu ve vašich ústech, což může mít za následek vyšší naměřené hodnoty.
2. Čidlo v detektoru je vysoce citlivé, nepoužívejte detektor bezprostředně po kouření nebo pití alkoholu. Počkejte aspoň dvě minuty. Kouř nebo alkohol může zničit čidlo detektoru. Nepoužívejte detektor v silném větru nebo v místnosti se silně znečištěným vzduchem (kouř, alkohol). Nelijte ani jinak nevpravujte žádnou tekutinu do detektoru můžete zničit čidlo detektoru.
3. Všeobecně snímače alkoholu ovlivňuje teplota a vlhkost vzduchu. Proto se můžou vyskytnout mírné nepřesnosti měření. Tolerance je +/- 15 %.
4. Nevystavujte detektor extrémním teplotním a klimatickým vlivům.
5. Symbol C na displeji upozorňuje uživatele, že je nutné poslat detektor na kalibraci.

Specifikace:

Rozměry:	10,4 x 4,0 x 2,0 cm
Hmotnost:	85 g
Typ senzoru:	Advanced Semiconductor Oxide Senzor
Čas přípravy k měření:	méně jak jedna minuta
Čas reakce:	4 s
Doba regenerace:	30 s
Baterie:	2 x 1,5V AA alkalická
Životnost baterie:	100 až 200 měření
Rozsah měření:	0,0 – 4,0 promile
Provozní teplota:	+10 – + 40°C
Přesnost:	+/- 15 %
Kalibrace:	doporučuje se při běžném používání po 6-ti měsících. Kalibraci provádí dovozce detektoru.
Certifikát:	CE
Záruka:	2 roky

ZÁRUKA

Přebíráme záruku po dobu 24 měsíců ode dne prodeje za bezvadnou jakost a činnost výrobku v souladu s normou výrobce a veškeré závady v činnosti, které se vyskytnou během této lhůty, bezplatně opravíme. Na základě této záruky nelze uplatňovat další nároky na vzniklé ideální ztráty (ušlý zisk atp.)

Záruka se nevztahuje na:

- závady zaviněné neodborným zacházením
- vdechování vysoké koncentrace alkoholu a kouře (bezprostředně po požití alkoholu, případně po kouření)
- zásah nepovolané osoby
- přirozené opotřebení vnějších povrchů
- přirozené opotřebení čidla
- **nutnost kalibrace detektoru**

Při uplatňování nároku na záruční opravu je nutno předložit **Záruční list**.