



Stabilizační podpora kolene, nastavitelná S6035

- „Contour design“ - nastavitelné popruhy na suchý zip pro individuální kompresi a pohodlné nošení.
- Snadné nasazování a maximální opora.
- Je vyrobena z prodyšného aeroprenu (zdravotně nezávadný neopren s mikroventilací) a bavlny pro optimální pohodlí. Poskytuje teplo a rovnoměrnou kompresi na oslabené nebo přetěžované koleno.
- Univerzální velikost (jedna velikost padne většině).
- Vhodná pro levé i pravé koleno.

Bandáž Dr. Frei PRO je vhodná jako prevence úrazu oslabeného kolene a česky při účasti na sportovních a pohybových aktivitách či při chronické nestabilitě česky (rekurentní subluxace), poraněních a vazivové laxitě (volnosti) kolenního kloubu. Doporučuje se v případě artritidy kolen, chronických bolestí a ztuhlosti. Fixuje kolenní kloub a poskytuje dodatečnou podporu a celkovou stabilitu kolenního kloubu. Pomáhá rozdělit zátěž na kloub během pohybu.

Doporučení pro použití: Před použitím se poraďte se svým lékařem. Doporučuje se nosit přímo na spodní prádlo. Individuální léčbu a dobu používání stanoví lékař.

Kontraindikace: Lokální onemocnění kůže, individuální intolerance na použitý materiál.

Rozměry	Velikosti	Maximální odchylka
	UNIVERZÁLNÍ VELIKOST	
Obvod kolene, cm	34 - 46	± 1,0 cm



Jak správně nasadit ortézu:

Na pravou nohu:



Na levou nohu:



Údržba: Perte s jemnými čisticími prostředky při teplotě do + 35 ° C. Neotírejte ani neždímejte při mytí oplachování. Sušte mimo zdroj tepla. Nežehlete. Nebělte. (Nepoužívejte bělicí prostředky obsahující chlor. Nepoužívejte chemické čištění.

Upozornění: Používejte pouze za účelem, ke kterému byla ortéza vyrobena. Doba používání může být upravena pouze na základě doporučení lékaře. Výrobek se nedoporučuje nosit do 30 minut po aplikaci lokálních ohřívacích mastí.

Složení: aeropren - 65%, polyester - 20%, bavlna - 15%.

Podmínky skladování: Skladujte na suchém místě při teplotě od +5°C do +40°C. Udržujte mimo dosah přímého slunečního světla.

Datum výroby: Uvedeno na obalu.

Velikost: Univerzální

Výrobce: Medtex Swiss Ltd, 15 Konservna str., Gabrovo, Bulgaria 5300 tel.: +359 888 059 356, e-mail:

info@medtex-swiss.ch, medpack-group.com, medtex-swiss.ch, dr-frei.com Dr. Frei is a registered Trademark of FreiCare Swiss AG, Switzerland. A Swiss Brand.

Distributor: medHaus s.r.o., Kačírkova 1, 158 00, Praha 5, Tel: 226 202 268, e-mail: medhaus@medhaus.cz, www.medhaus.cz, www.medpack-group.cz.