



Ortéra na loket s dodatečnou fixací S8321

- Ortéra s nastavitelnými popruhy na suchý zip poskytuje individuální kompresi a fixaci oslabeného kloubu.
- Další kruhový tlakový bod vyvíjí extra tlak na sval v lokti.
- Prodyšný elastický materiál aeropren (zdravotně nezávadný neopren s mikroventilací) zajišťuje kompresi a stabilizaci zápěstí.
- Univerzální velikost (jedna velikost padne většině).
- Vhodná pro pravou i levou ruku.

Ortéra Dr. Frei PRO je vhodná jako prevence úrazů při sportu či pohybových aktivitách. Loketní ortéra poskytuje nastavitelnou kompresi a podporu loketního kloubu. Pomáhá v případě opakovaných sportovních zranění, jako je tenisový a golfový (oštěpařský) loket tím, že snižuje nadměrné pohyby na vnitřní a vnější straně kloubu.

Doporučení pro použití: Před použitím se poraďte se svým lékařem. Doporučuje se nosit přímo na tělo nebo spodní prádlo. Individuální léčbu a dobu používání stanoví lékař.



Kontraindikace: Lokální onemocnění kůže, individuální intolerance na použitý materiál.

Rozměry	Velikosti	Maximální odchylka
	UNIVERZÁLNÍ VELIKOST	
Obvod lokte, cm	24 - 30	± 1,0 cm




Jak správně nasadit ortézu:

Na pravou ruku:

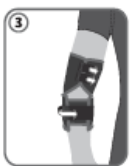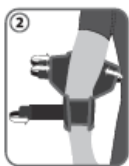

Na levou ruku:

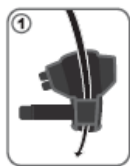

Údržba: Perte s jemnými čistícími prostředky při teplotě do + 35 ° C. Neotírejte ani neždímejte při praní a oplachování. Sušte mimo zdroj tepla. Nežehlete. Nebělte. (Nepoužívejte bělicí prostředky obsahující chlor. Nepoužívejte chemické čištění.

Upozornění: Používejte pouze za účelem, ke kterému byla ortéra vyrobena. Doba používání může být upravena pouze na základě doporučení lékaře. Výrobek se nedoporučuje nosit do 30 minut po aplikaci lokálních hřejivých masť.

Složení: aeropren - 60%, polyester - 20%, bavlna - 15%, latex – 5%.

Podmínky skladování: Skladujte na suchém místě při teplotě od +5°C do +40°C. Udržujte mimo dosah přímého slunečního svitu.

Datum výroby: Uvedeno na obalu.

Velikost: Univerzální

Distributor: medHaus s.r.o., Kačírkova 986/11, 158 00, Praha 5, Tel: 226 202 268,

e-mail: medhaus@medhaus.cz, www.medhaus.cz, www.medpack-group.cz.

Výrobce: Medtex Swiss Ltd, 15 Konservna str., Gabrovo, Bulgaria 5300 tel.: +359 888 059 356,

e-mail: info@medtex-swiss.ch, medpack-group.com, medtex-swiss.ch, dr-frei.com Dr. Frei is a registered

Trademark of FreiCare Swiss AG, Switzerland. A Swiss Brand.