

schülke -+



Tekutý koncentrovaný dezinfekční přípravek na bázi chlornanu s mycí složkou, určen pro dezinfekci ploch a povrchů ve zdravotnictví, komunální hygieně a potravinářství.

Plně virucidní
do 5ti minut

desam® prim

Naše Plus

- Účinný, efektivní a ekonomický
- Čištění a dezinfekce v jednom kroku
- Výborný čistící a mycí efekt
- Celé spektrum dezinfekční účinnosti
- Testy ve vysoké biologické zátěži
- Účinný na *Clostridium difficile*
- Kompatibilní s opakovaně plnitelným zásobníkovým systémem schülke wipes

Oblast použití

desam® prim se doporučuje do prostor se zvýšeným rizikem přenosu virových onemocnění a výskytem plísní jak ve zdravotnictví, v komunální hygieně, tak i v potravinářských provozech. Pro své deodorizační schopnosti je vhodný do prostor s úpornými pachy (toalety, sklady, vlhké prostory...). Doporučuje se do epidemicky závažných situací a pro terminální dezinfekci prostor.

Účinnost

Baktericidní, fungicidní, plně virucidní, mykobaktericidní, sporicidní

Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

Návod na použití

Pracovní roztok si připravte bezprostředně před použitím, naředěním **desam®u prim** vodou (max. do 30 °C). Koncentraci pracovního roztoku si zvolte dle požadovaných parametrů na biocidní účinnost. Biologickou kontaminaci povrchu nejdříve odstraníme dle platných legislativních předpisů, následně dezinfikujeme. Předměty a povrchy se dezinfikují otřením (mop, utěrka...) nebo ponořením. Povrchy, které přicházejí do

styku s potravinami, je nutno po dezinfekci opláchnout pitnou vodou.



Složení

100 g desam[®] prim obsahuje následující aktivní látky:

- 4,7 g chlornan sodný

Další složení: hydroxid sodný, povrchově účinné látky, stabilizátory

Zvláštní upozornění

Pouze pro profesionální trh. Přípravek má bělící účinky. Pozor! Nepoužívejte s jinými výrobky. Nepoužívejte na barevné a lehké kovy, pozinkované povrchy, nestálo barevné tkaniny, kůži, dřevo, gumu a dále na poškozené kovové a smaltované povrchy. Nepřekračujte předepsanou dobu expozice. Skladujte v původním, uzavřeném obalu, mimo dosahu slunečního záření a tepelných zdrojů. Teplota skladování -5 °C +25 °C. Při manipulaci a práci používejte ochranné pracovní pomůcky. Po práci si ruce omyjte mýdlem (Prosavon) a ošetřete ochranným krémem (Balmea, Esemantan skin balm). Doba expirace: 12 měsíců

Objednávkové informace

Název produktu	Balení	Číslo výrobku
Desam Prim 1 L	12/Karton	70001423
Desam Prim 15 L	1/Kartón	70001705
Desam Prim 5 L	1/Kanistr	70001424

Související přípravky

- savagro[®] basic

Životní prostředí

Společnost schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality. Společnost Schulke CZ, s.r.o. je držitelem certifikátů ISO 13485 a ISO 9001.

Typ přípravku

Biocidní přípravek



Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.



Společnost Schülke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky.

Výrobce
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schulke.com