

## **Návod na použití filtrační polomasky FFP2 model HP2-01,**

### **Čtete návod k použití!**

Osobní ochranný prostředek filtrační polomaska pro ne zdravotnické účely kategorie III dle Nařízení (EU) 2016/425, respektive respirátor s filtrační třídou FFP2 NR dle normy EN 149:2001 + A1:2009

### **Rozsah použití**

Vhodná pro ochranu proti částicovým znečišťujícím látkám, jako je prach, kouř, aerosol a mlha, nikoli však pro ochranu proti plynům

Model: HP2-01

Kategorie ochrany: FFP2, účinnost filtrace vyšší nebo rovna 94 %

Doba životnosti: 3 roky

Nejmenší obchodní balení: krabička á 10 ks

Výrobek se dodává bez příslušenství.

### **Výkonnost výrobku**

1. Účinný 5vrstvý filtrační systém s vysoce účinnou filtrační vrstvou, která filtruje a chrání ještě účinněji a zároveň je prodyšná. Pětivrstvý filtrační systém má charakteristiku vysoké účinnosti

### **Podmínky přepravy a skladování**

Maska by měla být uchovávána v původním obalu. Skladujte na chladném a suchém místě (+10 °C - +30 °C; <80% vlhkost). Chraňte před působením agresivních chemikálií, vlhkosti a nečistot.

### **Použití:**

1. Ověřte si, zda je obal masky nepoškozený
2. Nastavte měkkou sponu tak, aby se přizpůsobila nosu
3. Otevřete skládací masku.
4. Na horní straně vytvořte nosní můstek.
5. Pásky upevněte za uši.
6. Zkontrolujte, zda se vám dobře dýchá, a případně proveďte úpravy.

### **Bezpečnostní upozornění:**

Pro správné používání respirátoru je důležité dodržovat následující pokyny: - Pokud jste nemocní, je ochranná maska nevhodná. Poradte se se svým lékařem. - Zvažuje se použití ochranné masky, která při prvním nasazení ztěžuje dýchání - Může nějakou dobu trvat, než se uživatel v ochranné masce bude cítit pohodlně. - Tato ochranná maska nenahrazuje ochranná opatření (pravidelné mytí rukou, fyzický odstup, omezení kontaktu s jinými osobami). Minimalizuje průchod kapiček slin, když nositel dýchá do okolí. - Nepoužívejte při namáhavé fyzické aktivitě. Při prvních známkách poškození přestaňte tento výrobek používat. Po jednorázovém použití masku znovu nepoužívejte a řádně ji zlikvidujte. Nedodržení pokynů při používání tohoto výrobku může snížit účinnost masky a způsobit onemocnění nebo smrt. V případě použití masky na vousy je možné, že maska nebude správně těsnit.

**VAROVÁNÍ:** Tato maska není zdravotnickým prostředkem ve smyslu směrnice 93/42/EHS nebo nařízení EU/2017/745 (chirurgické roušky). Děti ve věku od 3 do 12 let by měly být při nošení pod dohledem. Určeno pro dospělé. Nevhodné pro děti do 3 let!

NR = Non Reusable - jednorázové použití

Oznámený subjekt: CE 2841

### **Výrobce:**

HONNES SAGLIK VE ENDUSTRIYEL URUNLERI A.S, Cumhuriyet Mah. Karayel Sok. No: 14 Cayirova, KOCAELI, Turecko

### **Dovozce:**

TRIO Zlín OOPP, s.r.o., Politických vězňů, 912/10, Praha 1, 110 00, Česká republika

Prohlášení shody je dostupné na [www.workshop-safety.com](http://www.workshop-safety.com)

Posouzení shody provedl a EU certifikát typu vydal oznámený subjekt č. 2841 MNA LABORATUVARLARI SANAYI TICARET LIMITED ŞİRKETİ, Küçükbakkalköy Mah. Yenidoğan Cad. No: 21, Ataşehir/İSTANBUL, Turecko