

NÁVOD K POUŽITÍ

PRO OBLIČEJOVÉ MASKY (ÚSTENKY, ROUŠKY) TYP I, IR, II, IIR

Oblíčeje maska zamezuje šíření kapének, chrání tedy hlavně okolí svého nositele. Pro její správnou účinnost je nezbytné nutně dodržovat tento návod k použití a provádět pravidelně kontrolu její těsnosti. Oblíčeje masku používejte pouze po dobu určenou jejím výrobcem. Pokud není uvedeno výrobcem, doba použití je maximálně 2 hodiny. Po uplynutí této doby se výrazně snižuje její účinnost a ústenka přestává být efektivní.

Většina ústenek má univerzální velikost. Pro dostatečnou účinnost ústenky je nezbytné důležité její správné přiložení k obličeji. Pokud ústenka dostatečně nepřiléhá, mohou se skrz ponechané mezery šířit kapénky do okolí. Pokud nedokážete ústenku správně připevnit, měli byste zkusit jiný model. Oblíčeje maska by neměla být příliš velká, aby vám nepřekážela v očích a nebránila ve výhledu. Měla by zároveň dobře přiléhat celým svým okrajem na pokožku obličeje. Zvláštní zřetel si zaslouží kontrola v oblasti kolem nosu a na bradě.

Skladování před použitím:

- v uzavřeném sáčku, například v původním balení
- v bezpečném prostředí (čistý vzduch)
- mimo přímé sluneční světlo
- v prostoru s vlhkostí a teplotou v takovém rozmezí, jaké je uvedeno na obalu.

Skladování po použití:

Ústenku vložte do nepropustného obalu a vhodte do smíšeného odpadu. Znovupoužitelnou ústenku po sundání z obličeje nechte vyvětrat na bezpečném místě s přívodem čerstvého vzduchu a vydezinfikujte či vyperte ji dle doporučení konkrétního výrobce. Pro likvidaci případné kontaminace nebezpečnými mikroorganismy můžete ústenku postříkat vně i uvnitř dezinfekcí určenou na daný typ obličeje masky. Po skončení životnosti ústenku vložte do nepropustného obalu a vhodte do smíšeného odpadu.

Nasazení:

- 1 Opatrně vyjměte ústenku z původního obalu. Je důležité sahat pouze na gumičky, aby nedošlo ke kontaminaci materiálu, přes který budete dýchat.
- 2 Nasadte si ji na obličej tak, aby zakrývala ústa a nos. Gumičky nebo pásky zachyťte za uši tak, aby vám ústenka dobře držela na obličeji.
- 3 Ústenku přitiskněte k obličeji a upravte ji tak, aby dobře přiléhala. Zvláště dbejte na vytvarování spony v oblasti nosu.

