



CS NÁVOD K POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ: EN 149:2001+A1:2009 respirátory na jedno použití chránící proti tuhým a kapalným aerosolům jsou zařazeny v jedné ze tří kategorií - FFP1, FFP2, a FFP3. Než začnete číst následující informace, laskavě zkontrolujte, do které kategorie respirátor náleží – kategorie je uvedena jak na obale, tak na respirátoru.

POUŽITÍ: • **FFP1:** ochrana proti netoxickým pevným a kapalným aerosolům (např. olejové kapénky) v koncentracích do 4×OEL (APF=4. NPF=4). • **FFP2:** ochrana proti netoxickým a málo až středně toxickým pevným a kapalným aerosolům (např. olejové kapénky) v koncentraci do 10×OEL (APF=10. NPF=12). • **FFP3:** ochrana proti netoxickým, málo až středně toxickým a vysoce toxickým pevným a kapalným aerosolům (např. olejové kapénky) v koncentraci do 30×OEL (APF=30. NPF=50). ***Poznámka:** OEL = přípustný expoziční limit (Occupational Exposure Limit). APF = určený ochranný faktor (Assigned Protection Factor). NPF = jmenovitý ochranný faktor (Nominal Protection Factor)

ZKONTROLUJTE PŘED POUŽITÍM: Před použitím prověřte zda na respirátoru, včetně všech jeho součástí nejsou díry, trhliny nebo jiná poškození. Pokud zjistíte jakékoli poškození **NEPOUŽÍVEJTE** jej a vezměte si nový respirátor.

A NÁVOD K NASAZENÍ: ① Držte respirátor v ruce, koncečky prstů směrem k nosní části. Pásky k upevnění na hlavě nechte volně splývat podél ruky. ② Přiložte respirátor pevně k tváři s nosní částí na kořeni nosu. ③ Napněte a přetáhněte přes hlavu spodní pásku a umístěte ji pod uši. Napněte a přetáhněte přes hlavu horní pásku a ponechte nad ušima. ④ Lehce přitlačte na nosní část respirátoru a vytvarujte jej kolem nosu. ⑤ (a) Zkouška nasazení respirátoru bez výdechového ventilu: Zakryjte respirátor oběma rukama a důkladně vydechněte. (b) Zkouška nasazení respirátoru s výdechovým ventilem: Zakryjte respirátor oběma rukama a zostra se nadechněte. Uvnitř respirátoru by měl být pociťován negativní tlak. Pokud cítíte proudit vzduch kolem nosu, přitáhněte nosní část. Jestliže vzduch proniká kolem okrajů, přizpůsobte polohu pásek. ***Poznámka:** Respirátor okamžitě vyměňte, pokud pociťujete dechové obtíže, pokud je respirátor poškozen či prohnut nebo v případě, že nelze dosáhnout vyhovujícího nasazení na obličej. K bezpečnému používání respirátoru je nezbytné pečlivé dodržování těchto pokynů.

UPOZORNĚNÍ: 1. Nedodržení všech pokynů a omezení použití tohoto výrobku může snížit ochranný účinek respirátoru a způsobit nemoc či smrt. 2. K ochraně vašeho zdraví je nezbytné vybrat správný respirátor. Před použitím tohoto respirátoru konzultujte s hygienikem či bezpečnostním technikem, zda vyhovuje vašim potřebám. 3. Tento výrobek nezásobuje kyslíkem. Používejte pouze v přiměřeně větraných oblastech obsahujících dostatek kyslíku k udržení života. Neužívejte tento respirátor, je-li koncentrace kyslíku pod 19%. 4. Nepoužívejte, pokud koncentrace znečišťujících látek bezprostředně ohrožuje zdraví či život. 5. Nepoužívejte ve výbušném prostředí. 6. Okamžitě opusťte pracovní plochu a vyhledejte čerstvý vzduch v případě, že (a) se dýchání stává obtížným, nebo (b) se dostaví závratě či jiná nevolnost. 7. Ochranný účinek respirátoru mohou snížit vousy nebo vlasy na obličejí či určité výrazné rysy obličejí. 8. Respirátor v žádném případě nepozměňujte a neupravujte. 9. Určeno pouze na jedno použití. Není třeba žádná údržba. Po použití respirátor znehodnoťte. 10. Před použitím uchovávejte respirátory v původní krabici chráněné před přímým slunečním světlem.

VÝROBCE/DOVOZCE: viz. kontaktní informace na obalu výrobku.

B Význam piktogramů / symbolů: (a) Čtete instrukce pro uživatele. (b) Rozsah teplot pro skladování. (c) Maximální vlhkost prostředí při skladování. (d) Datum trvanlivosti: umístěna na výrobku. (e) NR: tento respirátor nesmí být používán déle než jednu směnu (maximálně 8 hodin) a nesmí být používán opakovaně. (f) D: tento respirátor vyhověl volitelné zkoušce zanášení dolomitovým prachem pro komfortnější dýchání.