

FFP3 filtrační polomaska tvarovaná s ventilkem GM204



SPECIFIKACE

POPIS	Výrobek se skládá z těla masky, těsnicího kroužku, gumičky, spony pro nastavení délky gumičky, a výdechového ventilků. Materiál těla masky je polyethylentereftalátová vpichovaná netkaná textilie a polypropylenová roztavená netkaná textilie. Gumička se skládá z 30% spandexu a 70% nylonu. Materiál těsnicího kroužku je EVA pěna a netkaná textilie s vpichovou jehlou z polyethylentereftalátu. Materiál výdechového ventilků je ABS a silice. Filtrační polomaska je určena k nošení k ochraně osob před přenosem částicového materiálu. Toto je nesterilní produkt na jedno použití. Velikost produktu: 12,6cm x 13cm
NORMA	EN 149:2001 + A1:2009
ČÍSLO NOTIFIKOVANÉ ZKUŠEBNY	CE 0099
BALENÍ	1 ks sáček, 15 ks krabice, 300 ks karton
ZÁRUČNÍ DOBA	2 roky
SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA	Skladujte na čistém a suchém místě při teplotě -10°C až 35°C a relativní vlhkosti ne více než 80%. Výrobky jsou přepravovány všemi druhy dopravy v souladu s pravidly přepravy zboží platnými pro každý druh přepravy. Tento produkt skladujte a přepravujte v původním obalu.
LIKVIDACE	Likvidace s běžným domovním odpadem
VAROVÁNÍ	Pro správné použití masky je nezbytné, před použitím v zaměstnání uživatele poučit zaměstnavatelem o pravidlech správného používání polomasky v souladu s příslušnými bezpečnostními a zdravotními normami. Masku se používá pro individuální ochranu lidských dýchacích orgánů před aerosoly různého složení. Nedodržení všech pokynů a omezení by mohlo vážně snížit účinnost této masky a mohlo by vést k onemocnění, zranění nebo smrti. Filtrační polomaska nesmí být používána déle než jednu směnu.
POUŽITÍ A ÚDRŽBA	Tato polomaska označená „NR“ se nesmí používat déle než na jednu směnu. Produkt nelze oprát ani dezinfikovat. Tato maska nedodává kyslík. Používejte pouze při dostatečném větrání. Masku filtrující částice musí být po každém použití zkontrolována, aby bylo zajištěno, že v dýchací zóně nejsou žádné jiné otvory nebo vpichy a že nedošlo k žádnému poškození. Za poškození se považují zvětšené díry vzniklé roztržením filtračního materiálu nebo jakékoliv jiné viditelné poškození. Nepoužívejte masku na bradku, nebo jinak upravené vousy nebo za jiných podmínek, které mohou bránit dobrému utěsnění masky na obličej.

