

ZH3161V

Filtrační polomaska FFP2 NR



SPECIFIKACE

POPIS Filtrační polomaska FFP2 NR s ventilem skládaná (nezdravotnická). **Filtrační účinnost třída FFP2 > 94%.**

KONSTRUKCE

NORMA EN 149:2001 + A1:2009

ČÍSLO NOTIFIKOVANÉ ZKUŠEBNY CE 2797

BALENÍ 20 ks v krabici

ZÁRUČNÍ DOBA 3 roky od data výroby

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA Teplota -20 °C až 30 °C, relativní vlhkost pod 80%. U skladovaných a překládaných produktů by mělo být zaručeno, aby byly zapečetěny, nepoškozeny, neznečištěny, nezasazeny vlhkostí, věnujte pozornost protipožární ochraně, odolné vůči dešti, kyselinám, zásadám, chráňte před ostrým světlem.

LIKVIDACE Likvidace s běžným domovním odpadem

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Ověřte si, jestli je obal masky nepoškozený.
2. Otevřete skládací masku.
3. Vytvořte nosní můstek na horní straně a spodní na bradě.
4. Nasad'te pásky na uši a zapněte sponku v zadní části hlavy.
5. Upravte si masku tak, aby seděla na nose.
6. Zkontrolujte, zda můžete dobře dýchat, a pokud je to nutné, proveďte úpravu.

VAROVÁNÍ

1. Tato maska označená „NR“ je určena pouze pro jedno použití.
2. Tato maska pomáhá chránit před určitými znečišťujícími látkami ve formě částic, ale zcela nevylučuje vystavení se riziku nákazy nebo infekce.
3. Nepoužívejte na bradku nebo jinak upravené vousy nebo za jiných podmínek, které brání dobrému utěsnění mezi obličejem a těsnicí plochou respirátoru.
4. Tento výrobek nedodává kyslík. Používejte pouze v přiměřeně větraných prostorách obsahujících dostatek kyslíku pro podporu života.
5. Nepoužívejte, jsou-li koncentrace kontaminujících látek bezprostředně nebezpečné pro zdraví nebo život.
6. Nepoužívejte tento výrobek ve výbušném prostředí.
7. Pokud je dýchání obtížné nebo se maska poškodí či deformuje, okamžitě ji vyměňte.

