

FFP2 Filtrační polomaska tvarovaná bez ventilku ZH3310



SPECIFIKACE

POPIS	Filtrační polomaska tvarovaná se stupněm ochrany FFP2 NR (nezdravotnická) bez ventilku. Respirátor poskytuje všeobecně druhý stupeň úrovně ochrany v souladu s normou EU 149:2001+A1:2009. Skládá se ze 3 vrstev. Materiál: 13% PP Spunbond textilie, 21% PP Melt blown textilie, 66% polyesterové vlákno. Ochranná třída FFP2. BFE > 94%, Upevnění: pásky za hlavu
NORMA	EN 149:2001+A1:2009
NOTIFIKOVANÝ ORGÁN	CE 2797
BALENÍ	20 ks v krabici, 400 ks v kartonu
ZÁRUČNÍ DOBA	3 roky
SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA	Skladujte na čistém a suchém místě při teplotě -20 ° C až 38 ° C a relativní vlhkosti ne více než 80%. Výrobky jsou přepravovány všemi druhy dopravy v souladu s pravidly přepravy zboží platnými pro každý druh přepravy. Tento produkt skladujte a přepravujte v původním obalu. Masku neupravujte ani nezneužívejte.
BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY	Nepoužívejte polomaska ani nevstupujte ani nezdívejte se v kontaminované oblasti za následujících okolností: 1. Atmosféra obsahuje méně než 19,5% kyslíku. 2. Pokud jste cítíte kontaminant. 3. Pro ochranu před plyny nebo páry. 4. Kontaminanty nebo jejich koncentrace nejsou známy nebo jsou bezprostředně nebezpečné pro život nebo zdraví. 5. Tryskání pískem, stříkání barev a azbestu 6. Ve výbušném prostředí
VAROVÁNÍ	Správně zvolená polomaska je nezbytná, před použitím v zaměstnání musí být uživatel školen zaměstnavatelem o správném používání polomasky v souladu s příslušnými bezpečnostními a zdravotními normami. Používá se pro individuální ochranu lidských dýchacích orgánů před aerosoly různého složení. Nedodržení všech pokynů a omezení by mohlo vážně snížit účinnost této polomasky a mohlo by vést k onemocnění, zranění nebo smrti. Filtrační polomaska nesmí být používána déle než jednu směnu.
POUŽITÍ A ÚDRŽBA	Tato polomaska označená „NR“ se nesmí používat déle než na jednu směnu. Produkt nelze oprát, dezinfikovat. Tato polomaska nedodává kyslík. Používejte pouze při dostatečném větrání. Polomaska filtrující částice musí být po každém použití zkontrolována, aby bylo zajištěno, že v dýchací zóně nejsou žádné jiné otvory nebo vpichy kolem a u sponek a nedošlo k jejímu poškození. Za poškození se považují zvětšené díry vzniklé roztržením nebo roztržením filtračního materiálu kolem propíchnutí svorek. Tato polomaska pomáhá chránit před určitými znečišťujícími částicemi, ale nevylučuje vystavení riziku nebo nakažení chorobou nebo infekcí. Nesprávné použití může mít za následek nemoc nebo smrt. Nepoužívejte polomasku na bradku, nebo jinak upravené vousy nebo za jiných podmínek, které mohou bránit dobrému utěsnění obličeje.

