

Machine Translated by Google

o-Hydroxyhippurová kyselina d/l-Octopamin		Chinin
Ibuprofen	Kyselina oxalinová	ranitidin
d/l-isoproterenol	Papaverin	Serotonin
Acetofenetidin	Pentazocin hydrochloridSulindac	
Kyselina acetylsalicylová	Fenelzin	Tetrahydrokortison 3-acetát
Amoxicilin	Fenylpropanolamin	Thiamin
Kyselina l-askorbová	Prednison	d/l-tyrosin
aspartam	d-propoxyfen	triamteren
Kyselina benzinová	Quinakrin	trimethoprim
Benzfetamin	Quindine	tyramin
Kofein	Kyselina salicylová	verapamil
chloramfenikol		Zomepirac

BIBLIOGRAFIE

- Mezinárodní rada pro kontrolu narkotik. Zpráva Mezinárodního úřadu pro kontrolu narkotik za 2009[R]. New York: UN, 2010
- Baselt RC. Dispozice toxických drog a chemikálií u člověka. 2nd Ed. Biomedical Publ., Davis, CA. 1982; 48

Rejstřík symbolů

	Konzultovat Pokyny pro Použití		Testy na sadu		Autorizovaný Zástupce
	Pro in vitro pouze pro diagnostické použití		Spotřebuje do		Nepoužít ve stejné zkušební době
	Skladujte při teplotě 2-30 °C		Číslo šarže		Katalog #
	Nepoužít, pokud balení není poškozeno		Výrobce		

 **Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd.**
 #550, Yinhai Street
 Hangzhou Economic & Technological Development Area
 Hangzhou, 310018 P.R. China
 Web: www.alltests.com.cn Email: info@alltests.com.cn



MedNet EC-REP GmbH
 Borkstrasse 10,
 48163 Muenster,
 Germany

Číslo: 146406501

Datum revize: 2023-10-30