



Uživatelský manuál

Veroval[®] medi.connect:
Jediným kliknutím ovládejte své zdraví.



Veroval®

Osobní diagnostika

Značka Veroval® prezentuje nejucelenější řadu domácí diagnostiky na našem trhu. Diagnostické přístroje a domácí testy Veroval® poskytují informace o tělesné kondici a přispívají k lepšímu zdravotnímu stavu a celkové pohodě. Klinicky ověřené přístroje a testy sledují širokou škálu tělesných ukazatelů jako je váha, hladina cholesterolu, krevní tlak či EKG.

Trend osobní diagnostiky:

3 600 000 lidí

v České republice má zájem
se starat o své zdraví

Naměřené hodnoty můžete nyní díky softwaru Veroval® medi.connect snadno ukládat, analyzovat, vzájemně porovnávat anebo sdílet s lékařem. Instalace a ovládání programu je jednoduché a intuitivní.

S přístroji a domácími testy Veroval® s napojením na Veroval® medi.connect budete mít svůj zdravotní stav pod kontrolou.

- Bezplatné stažení softwaru do vašeho počítače
- Snadné načtení dat ze všech přístrojů pomocí dodaného USB kabelu nebo Bluetooth
- Individuálně volitelné intervaly analýzy: denně, týdně, měsíčně
- Naměřené výsledky můžete svému lékaři vytisknout nebo odeslat e-mailem jako PDF soubor

Veroval® – nejširší sortiment osobní diagnostiky na českém trhu.

KREVNÍ TLAK

Pažní a zápěstní tlakoměr pro rychlé, přesné a snadné měření krevního tlaku



EKG | KREVNÍ TLAK

Unikátní přístroj pro monitorování srdečního rytmu a plně automatické měření krevního tlaku



VÁHA

Inteligentní osobní váha pro analýzu optimální hmotnosti a celkového tělesného stavu



DOMÁCÍ TESTY

Široká škála domácích testů založených na moderních diagnostických postupech




AKTIVITA


Inteligentní fitness náramek pro cílenou analýzu pohybu

Manuál pro základní orientaci v programu **Veroval® medi.connect**

1. Software Veroval® medi.connect si **zdarma** stáhněte z **www.veroval.cz**
Klikněte na záložku **MEDI.CONNECT**.

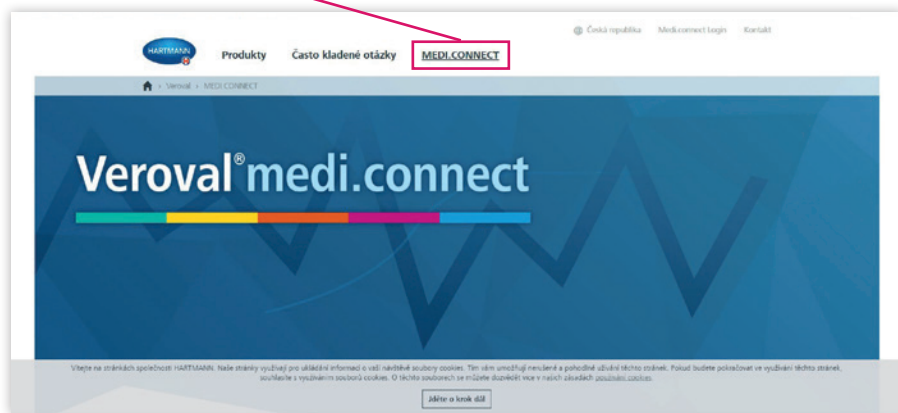

Klikněte na tlačítko **Stáhnout**.

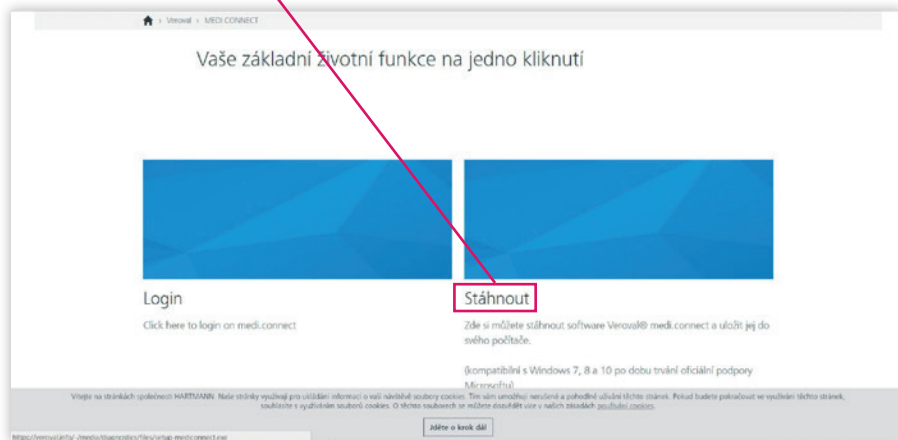


2. Po instalaci můžete spustit program Veroval® medi.connect. Při prvním spuštění je nutné vyplnit údaje o uživateli označené červenou hvězdičkou a tyto údaje **Uložit**.

The screenshot shows the 'Můj profil' (My profile) registration page. The page has a dark blue header with the 'Veroval® medi.connect' logo and the 'HARTMANN' logo. Below the header is a navigation bar with tabs: 'Přehled', 'Krevní tlak', 'EKG', 'Hmotnost', 'Teplota', 'Domácí test', and 'Nastavení'. Underneath are sub-tabs: 'Můj profil', 'Systém', 'Krevní tlak', 'EKG', 'Hmotnost', 'Teplota', and 'Připomínky'. The main content area is titled 'Můj profil' and contains a form for user registration. The form is divided into two columns. The left column has a 'Přidat uživatele' (Add user) section with radio buttons for 'Muž' (selected) and 'Žena'. Below this are input fields for 'Jméno', 'Příjmení', 'Datum narození', and 'Heslo'. The right column has input fields for 'Ulice', 'PSČ', 'Město', 'Věk (rok)', 'Váha (kg)', and 'Country'. A red box highlights the 'Uložit' (Save) button at the bottom left of the form. A red arrow points from the 'Uložit' button to the text in step 2.

3. Před zahájením stahování dat je nutné v **Nastavení** označit přístroj, který používáte např. **Veroval® EKG a tlakoměr**. Zde musíte také nastavit paměť uživatele, jehož data chcete stáhnout.


The screenshot shows the 'Nastavení' (Settings) page for the 'EKG' section. The page has the same dark blue header and navigation bar as the previous screenshot. The 'Nastavení' tab is highlighted in the navigation bar. The main content area is titled 'EKG' and contains a form for selecting a device and user. The form has a dropdown menu for 'včetně přístroje:' (including device:). The selected option is 'Veroval EKG a tlakoměr' with a sub-menu '1. Paměť uživatelů v přístroji'. Below the dropdown are 'Uložit' (Save) and 'Obnovit' (Reset) buttons. Red boxes highlight the 'Nastavení' tab in the navigation bar and the 'Uložit' button. Red arrows point from the text in step 3 to these elements.

UPOZORNĚNÍ: stejná paměť musí být navolena i v přístroji jinak nedojde k přenosu dat.
Po navolení správné paměti je třeba ji **uložit**.

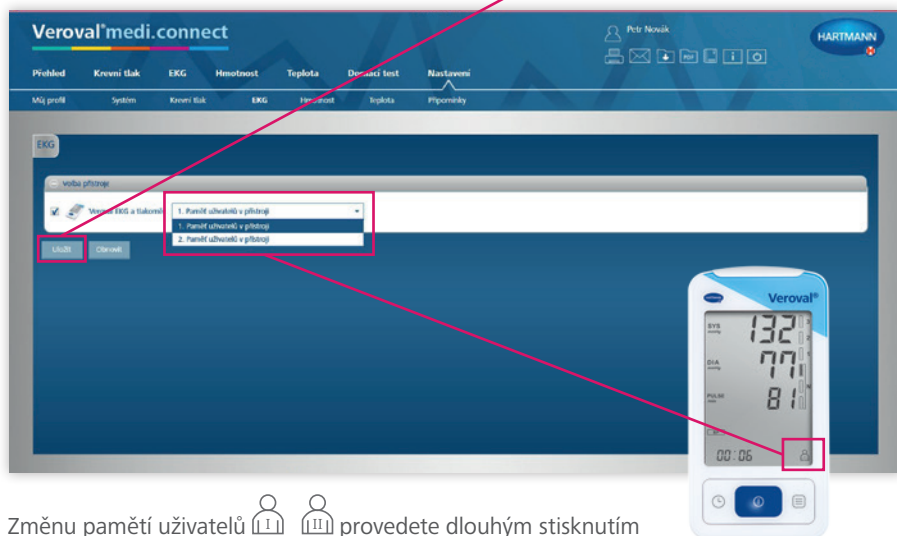


Změnu paměti uživatelů   provedete dlouhým stisknutím tlačítka  po dobu cca 3 sekund

UPOZORNĚNÍ: Pro zabezpečení vašich osobních dat a naměřených hodnot si můžete nastavit **přístupové heslo**.

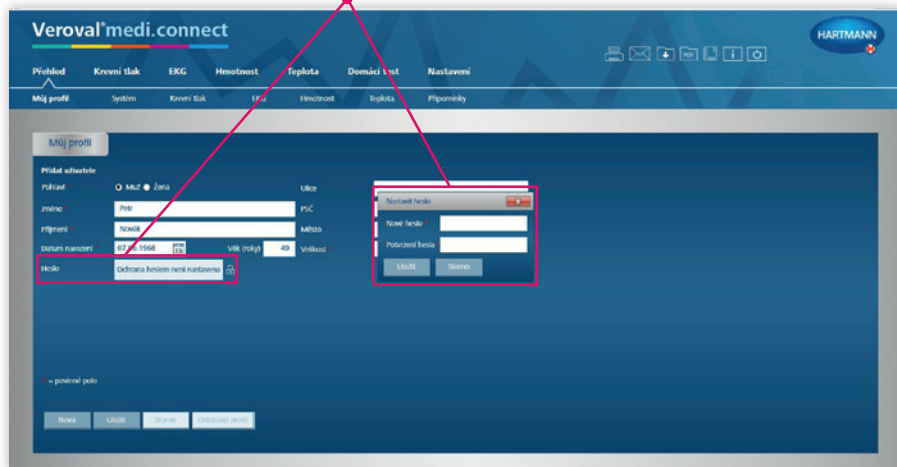


4. Pro stažení naměřených hodnot vyberte v horním menu EKG a poté klikněte na **ikonu složky se šipkou** pro zahájení přenosu dat.

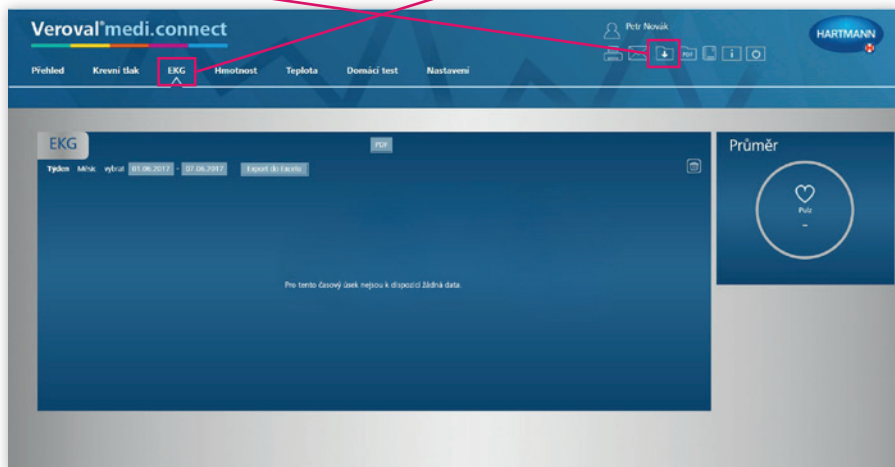


UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že máte v USB portu vložený bílý bluetooth vysílač. Při propojení tlakoměru Veroval® 2-v-1 s počítačem **je nutné, aby byl přístroj neustále zapnutý**. Automatickému vypnutí přístroje zabráníte zmáčknutím dolní elektrody.


5. V dalším kroku v otevřeném okně kliknutím na obrázek vyberte přístroj, který používáte. Nyní vyčkejte na spárování programu s vaším zařízením.

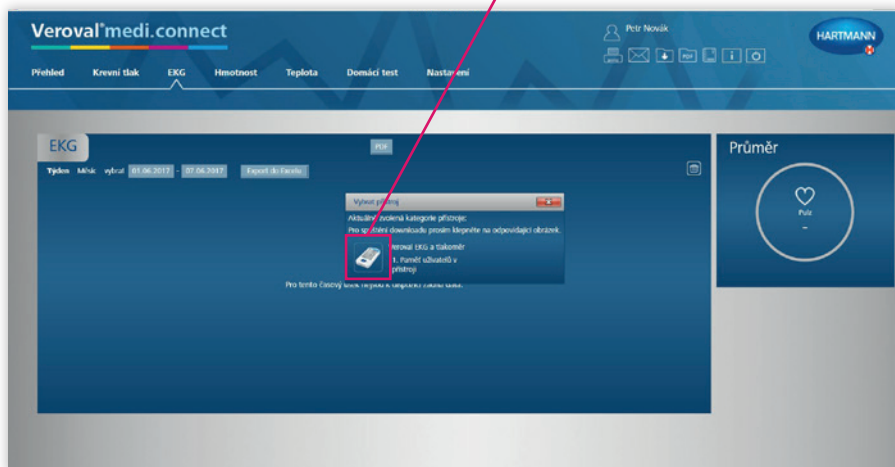

UPOZORNĚNÍ: Stále kontrolujte, že přístroj je během načítání dat zapnutý.

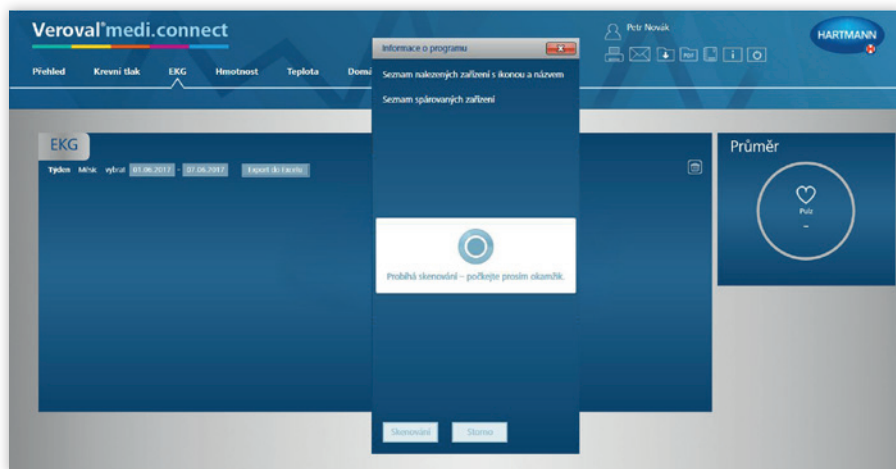


6. Po chvíli program zobrazí nalezená zařízení. Následně klikněte na ikonu bluetooth.

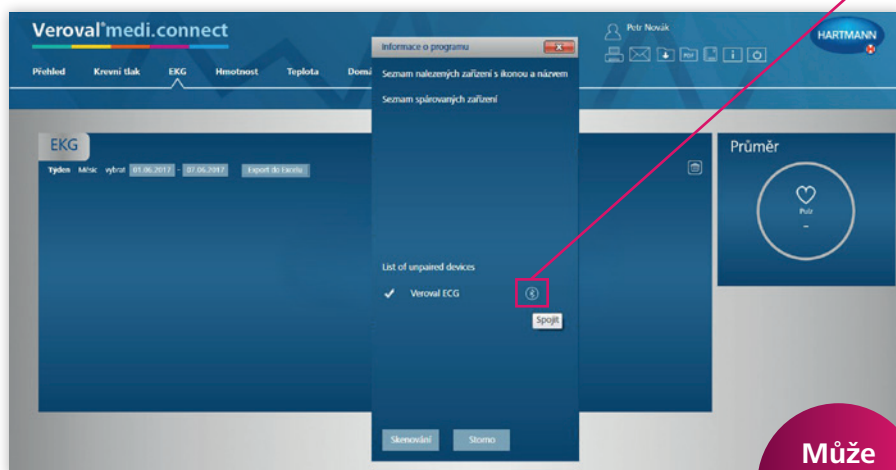


UPOZORNĚNÍ: Kontrolujte, že přístroj je během načítání dat stále zapnutý.

7. Po spárování dat klikněte na ikonku **Stáhnout**.

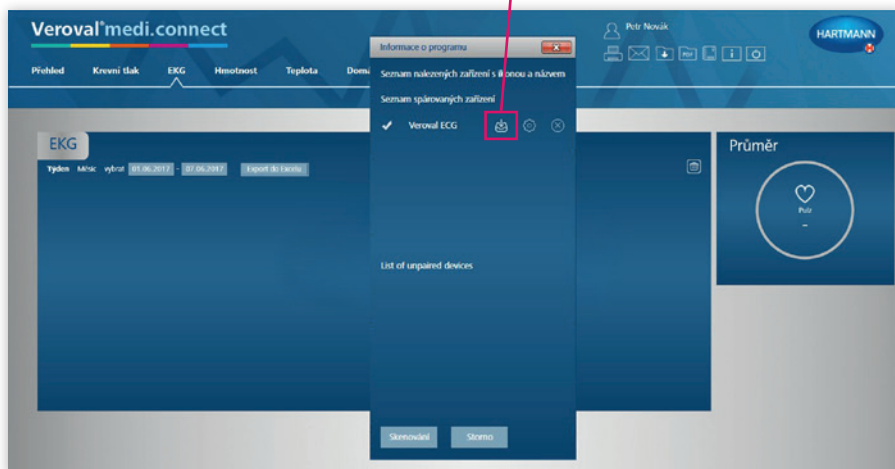


UPOZORNĚNÍ: Je nutné mít přístroj zapnutý.

8. V případě, že jste na tlakoměru měřili EKG i krevní tlak, zobrazí se Vám tabulka s údaji za krevní tlak a EKG zvlášť. Postupně stáhnete naměřená data kliknutím na tlačítka **Uložit** uvedená u jednotlivých měření.

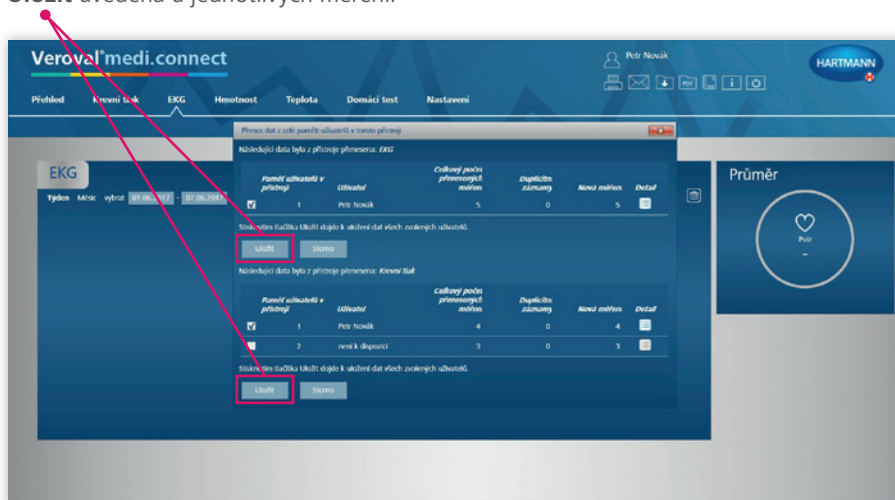

9. Pokud vše proběhne v pořádku, zobrazí se potvrzující informace, že **Měření** byla úspěšně uložena. Zavřete všechna okna a přepněte do sekce **Přehled**.

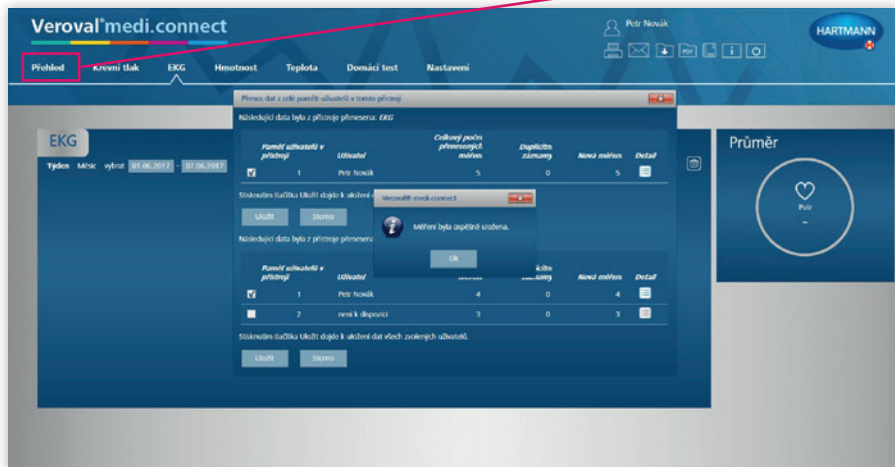


10. V Přehledu v dlaždici EKG by se mělo zapsat datum posledního měření (v našem případě 2. 1. 2017). Pro detailní informace klikněte v hlavní liště menu na EKG.



POZNÁMKA: V případě, že všechny dlaždice nevyužíváte, můžete je dočasně skrýt kliknutím na křížek konkrétní aktivity. Kdykoliv si můžete deaktivovanou dlaždici opět aktivovat kliknutím na **+ vložit**.

11. V sekci EKG se vám zobrazí nová měření. Pro detail jakéhokoliv měření je třeba kliknout na šipku **Detail**. ➔

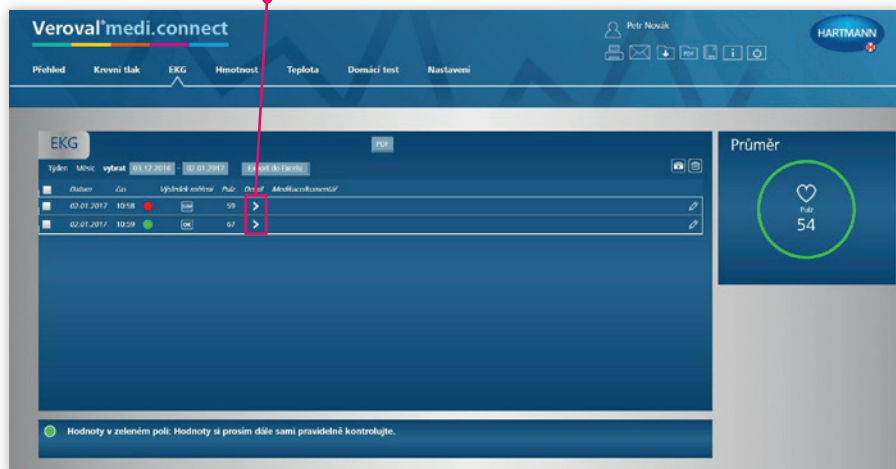

12. Jako detail jednotlivého měření se zobrazí EKG křivka. Zpět do výpisu naměřených dat EKG se vracíme opačnou šipkou v levém dolním rohu okna.





DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ. NEŽ BUDETE STAHOVAT DATA DO MEDICONECTU:

1. Ujistěte se, že máte v přístroji nastavený správný datum a čas.
2. Nestahujte data z více než 10 měření. Stažení jednoho měření trvá cca 10 vteřin. Vyhněte se tak dlouhému čekání při přenosu objemných dat.

Jak nastavit datum a čas


Dbejte, abyste měli správně nastaven datum a čas na vašem přístroji, jedině tak budete moci korektně ukládat své naměřené hodnoty a později je vyvolat.

Do režimu nastavení data a času se dostanete tím, že podržíte současně tlačítko  +  po dobu cca 3 sekund nebo znovu vložíte baterie do příslušné přihrádky přístroje.


Tímto aktivujete nastavení a postupujete následovně:

Alarm






Nejdříve se vám aktivuje upozornění na nastavení alarmu. Alarm slouží k nastavení upozornění vašeho následujícího měření.

Na displeji se vám zobrazí nápis , což znamená, že je váš alarm vypnutý.

Nechci aktivovat alarm

Zmáčknutím na tlačítko  se dostanete k nastavení data a času a váš alarm zůstane vypnutý.

Chci aktivovat alarm

Zmáčkněte , na displeji se vám zobrazí , po volbě  navolte postupně tlačítkem  hodinu a minuty alarmu a volbu vždy potvrďte zvolením .

Datum

Na displeji se vám postupně nabízí změna roku, měsíce a dne.

Zvolte nejdříve pomocí tlačítka  rok a uložte jej tlačítkem .

Stejně postupujte při nastavení měsíce a dne.


Čas

Na displeji blikají postupně hodiny a minuty.

Podle zobrazení na displeji nastavte tlačítkem  aktuální počet hodin resp. minut a volbu vždy potvrďte tlačítkem .

Chcete-li přístroj následně vypnout, stiskněte , jinak se přístroj vypne automaticky po 30 sekundách.



Návod, jak vymazat paměť měření

1. Vyberte paměť jednotlivých uživatelů , kterou chcete vymazat.
Paměť přepínáte dlouhým stisknutím **tlačítka**.



2. Poté klikněte znovu na **stejně tlačítko** tak, abyste se dostali do seznamu **měření**.



3. Pro vymazání stiskněte postupně tlačítko (ikona seznamu)  a následně (ikona vypnutí/zapnutí).  Obě tlačítka držte zmáčknuté, dokud nevidíte, že se všechny naměřené hodnoty nesmazaly.



DOPORUČENÍ: Po nahrání dat do softwaru Veroyal medi.connect průběžně mažte paměť v přístroji. Docílíte tak rychlejší přenos dat při následných připojeních.

Kontaktní informace:

HARTMANN – RICO a.s.

Masarykovo nám. 77

664 71 Veverská Bítýška

tel.: +420 549 456 130

fax: +420 549 457 411

e-mail: objednavky@hartmann.info

Bezplatná linka: 800 100 333

www.hartmann.cz

www.veroval.cz

